

本当に風邪？

それって花粉症かも？

夏～秋の花粉にもご注意を。

夏～秋の代表的な花粉

	イネ科 (オオアワガエリ、カモガヤ等)	ブタクサ (ブタクサ、オオブタクサ等)	ヨモギ
飛散時期	5～8月	8～11月	8～11月
生育場所	全国	全国	全国
特徴	スギ花粉が終わる頃、飛散する代表的な夏花粉。	スギ、ヒノキに次ぎ花粉症患者が多い。	秋花粉ではブタクサに次いで多い。

風邪が治らない…

水っぽい鼻水がとまらない…

くしゃみが止まらない！



風邪薬の効果があまりない

そんな方は、

実は風邪ではなく

花粉症の疑いもあります。

アレルギーの原因特定は

治療の第一歩！

マストV^{*1} は、夏～秋花粉項目9種類を含み1度に48種類のアレルゲンを測定できます

*1 「マストV」は「マストイムノシステムズV」の略称となります。

当検査の特徴

- 48種類^{*2}のアレルゲンを1回で測定できる検査です。 *2 一部、ミックス項目を含みます。測定項目をご確認ください。
- 夏～秋花粉項目9種類を測定できます。
- 検体^{*3}量は0.5mL (再検査分を含む) と患者様の負担が少ない検査です。 *3 血清となります。
- 特定原材料7品目のアレルゲンを全て検査できます。

測定項目

食物アレルギー 24種類

- | | |
|-------------|---------|
| 1. ミルク | 13. サバ |
| 2. コムギ | 14. マグロ |
| 3. 卵白 | 15. サケ |
| 4. オボムコイド | 16. エビ |
| 5. ゴマ | 17. カニ |
| 6. ソバ | 18. 豚肉 |
| 7. ダイズ | 19. 牛肉 |
| 8. コメ | 20. 鶏肉 |
| 9. ピーナッツ | 21. トマト |
| ・ 木の実ミックス | 22. モモ |
| 10. ヘーゼルナッツ | 23. キウイ |
| 11. アーモンド | 24. バナナ |
| 12. クルミ | |

■ 特定原材料7品目

花粉アレルギー 13種類

- | |
|-------------|
| 25. スギ |
| 26. ヒノキ |
| 27. ハンノキ |
| 28. シラカンバ |
| 29. ヨモギ |
| ・ イネ科ミックス |
| 30. オオアワガエリ |
| 31. カモガヤ |
| 32. ナガハグサ |
| 33. ハルガヤ |
| 34. ギョウギシバ |
| ・ ブタクサミックス |
| 35. ブタクサ |
| 36. オオブタクサ |
| 37. ブタクサモドキ |

その他のアレルギー 11種類

- | |
|---------------|
| 38. ハウスダストI |
| ・ ダニミックス |
| 39. コナヒョウヒダニ |
| 40. ヤケヒョウヒダニ |
| ・ イヌ・ネコ皮膚ミックス |
| 41. イヌ皮膚 |
| 42. ネコ皮膚 |
| 43. アスペルギルス |
| 44. カンジダ |
| ・ カビミックス |
| 45. アルテルナリア |
| 46. ペニシリウム |
| 47. クラドスポリウム |
| 48. ラテックス |

「○○ミックス」ってなに？

1項目に複数のアレルギーが含まれています。各アレルギーの結果は出ませんが、幅広い情報を入手することができます。
 陽性：ミックスされている全てまたは一部のアレルギーで陽性。必要に応じて単項目検査を実施します。
 陰性：ミックスされている全てのアレルギーが陰性。

夏～秋花粉項目9種類の相関

(添付文書より)

項目	既承認品A			既承認品B		
	全体一致率	陽性一致率	陰性一致率	全体一致率	陽性一致率	陰性一致率
ヨモギ	85%	93%	80%	91%	85%	100%
ブタクサミックス (全アレルギー)	89%	79%	93%	82%	63%	100%
ブタクサ	89%	81%	93%	80%	61%	100%
ブタクサモドキ	88%	78%	92%	87%	69%	100%
オオブタクサ	89%	79%	95%	80%	61%	100%
イネ科ミックス (全アレルギー)	96%	96%	97%	98%	96%	99%
ハルガヤ	99%	100%	98%	99%	98%	100%
ギョウギシバ	96%	100%	92%	98%	100%	96%
カモガヤ	95%	92%	98%	96%	92%	100%
オオアワガエリ	97%	97%	98%	96%	93%	100%
ナガハグサ	95%	92%	98%	98%	97%	100%

医科診療報酬点数 (レセプト算定) 内容

診療報酬区分 : D015 13 特異的IgE半定量・定量

測定目的 : アレルギー診断 (原因アレルギーの判定)

保険点数 : 1430点*4 (判断料 免疫学的検査 144点/月1回)

*4 アレルギーにつき110点で算定できます。ただし、1回につき1430点を限度にします。

ミナリスメディカル株式会社

〒104-6004

東京都中央区晴海1-8-10

TEL : 03-6219-7608 FAX : 03-6219-7614

http://www.hitachi-chem-ds.co.jp

詳しくは



アレルギーを正しく知ろう!!

で検索!